


Guida introduttiva

Lo strumento Comorbidities tool di BMJ Best Practice supporta la gestione del paziente a 360 gradi, con indicazioni su come trattare le condizioni acute insieme alle comorbidità preesistenti.


È possibile selezionare tra una gamma di comorbidità diffuse e ad alto costo per generare all'istante un piano di trattamento su misura per le esigenze specifiche del paziente.

Lo strumento permette di trattare e stabilizzare, facilmente e rapidamente, i pazienti con comorbidità. Questa gestione efficace del paziente aumenta l'efficienza e la qualità delle cure, portando in ultima analisi a risultati clinici migliori, ricoveri ospedalieri più brevi e un numero minore di nuovi ricoveri.


Per iniziare, seguire questi semplici passaggi

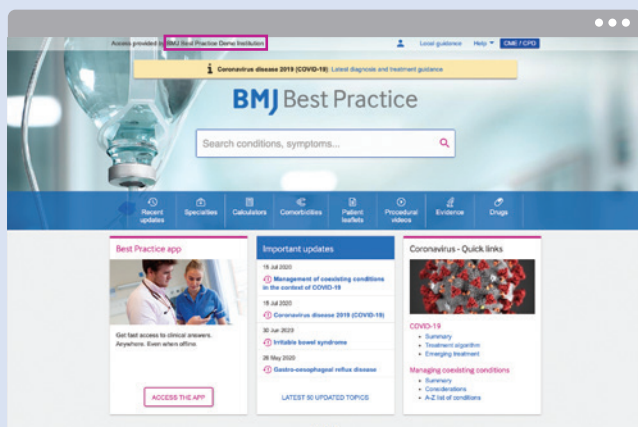


Passaggio 1: vai all'indirizzo bestpractice.bmj.com e accedi tramite il percorso preferito della tua istituzione. Se hai dubbi sul metodo di accesso del tuo istituto, rivolgiti al bibliotecario di riferimento. Saprai di aver effettuato correttamente l'accesso quando vedrai il nome del tuo istituto nella parte superiore della schermata.

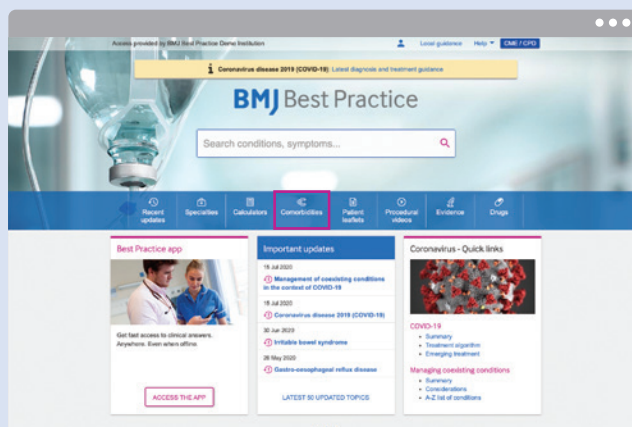


Passaggio 2: fai clic sull'icona **'Comorbidities'** (Comorbidità) nella barra di navigazione blu della pagina iniziale di BMJ Best Practice per visualizzare un elenco di tutti gli argomenti relativi alle condizioni acute per cui è possibile usare Comorbidities tool.

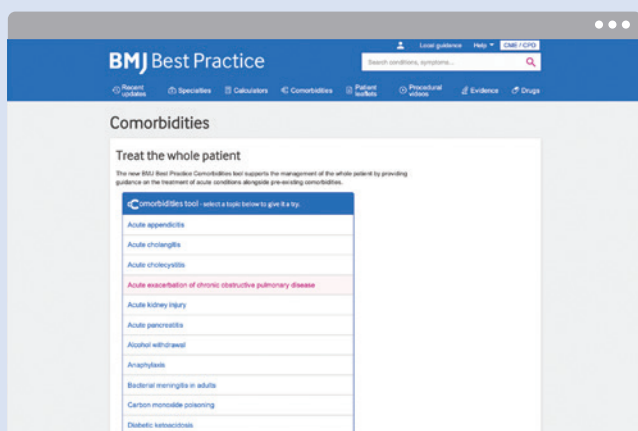


Passaggio 3: seleziona l'argomento relativo alla condizione acuta dall'elenco. Aggiungiamo continuamente altri argomenti all'elenco, quindi continua a controllare la presenza di aggiornamenti.

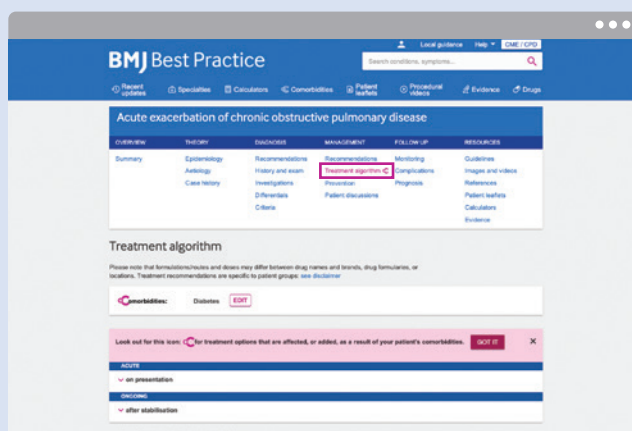

Passaggio 4: vai alla sezione **'Treatment algorithm'** (Algoritmo di trattamento) dell'argomento relativo alla condizione acuta selezionato. Il simbolo rosa **C+** indica la disponibilità di Comorbidities tool per tale argomento.

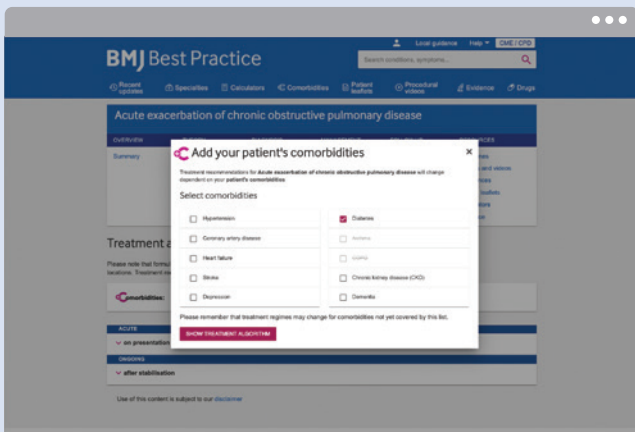


Passaggio 5: nella schermata si apre automaticamente la finestra di Comorbidities tool in cui si richiede di selezionare da un elenco di comorbidità comuni. Puoi selezionare tutte le comorbidità che desideri. Al termine dell'operazione, fai clic sul pulsante rosa **'Show treatment algorithm'** (Mostra algoritmo di trattamento). Se lo strumento Comorbidities tool non è pertinente per il paziente, puoi ignorarlo facendo clic sulla **'X'** nell'angolo in alto a destra.

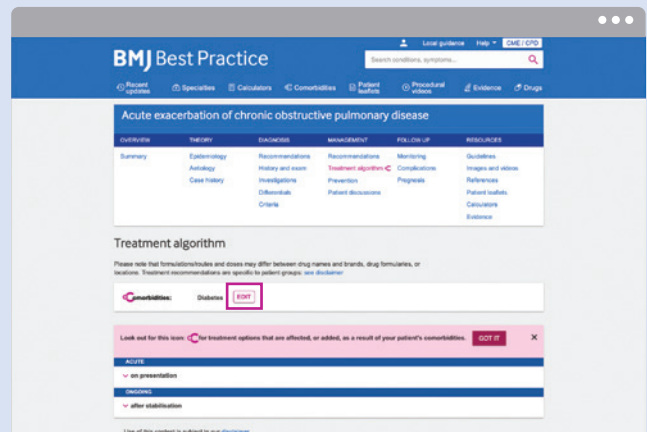

Passaggio 6: verrà generato un piano di trattamento personalizzato per il paziente, in base alle comorbidità selezionate, mostrate nella parte superiore della pagina. Puoi modificarle o rimuoverle facendo clic sul pulsante **'Edit'** (Modifica).



Passaggio 7: il simbolo **C+** indica chiaramente quando un'opzione di trattamento può essere influenzata dalle comorbidità selezionate.

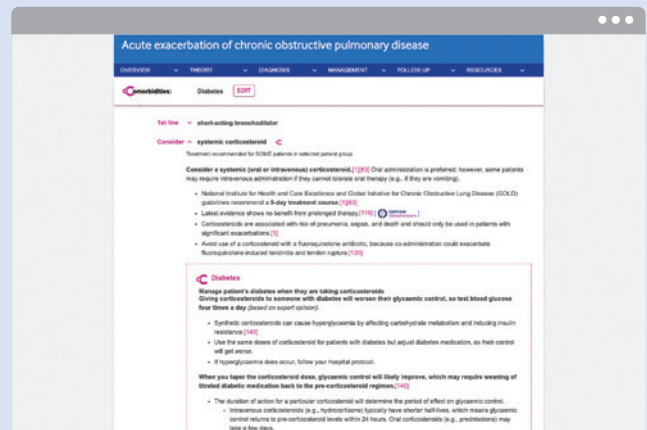

Passaggio 8: espandi l'opzione di trattamento selezionata per visualizzare i dettagli dell'adattamento del trattamento alla comorbidità. Il trattamento viene presentato in modo realistico per la pratica quotidiana. Le raccomandazioni fornite si basano sulle evidenze o sul parere di esperti in caso di evidenze scarse o equivocate.



Disponibile anche nell'app BMJ Best Practice

Puoi accedere a Comorbidities tool dalla sezione 'Treatment algorithm' (Algoritmo di trattamento) degli argomenti relativi alle condizioni acute nell'app. Per un riepilogo di tutti gli argomenti relativi alle condizioni acute per cui è possibile utilizzare lo strumento, fai clic sul link della schermata iniziale dell'app.

Scarica l'app dall'App Store o da Google Play per accedere ovunque e in qualsiasi momento, anche offline.

Serve altro aiuto?

Contattaci all'indirizzo support@bmj.com o visita il Centro Risorse BMJ per utili guide utente, video e altro ancora - bmj.com/company/bmj-resource-centre

bestpractice.bmj.com/comorbidities